



# Thundershirt

Den beste løsningen for engstelige hunder

## Bruk Thundershirt for

- Frykt for torden
- Nyttårsaften
- Nervøsitet i forbindelse med dyrlegebesøk
- Bjeffeproblemer
- Trening
- Angst for støy
- Separasjonsangst
- Bil eller reise
- Uro
- Angst for bur
- Generell frykt



## Slik fungerer den

Den patentsøkte utformingen til Thundershirt legger et mildt, konstant press på hundens torso, og dette trykket har en utrolig beroligende effekt for de fleste hunder. Dette trykket har blitt brukt for å redusere angst hos både dyr og mennesker. I likhet med foreldre som svøper spedbarn, og mennesker med autisme som bruker press for å lindre vedvarende angst.

For mange typer angst krever ikke Thundershirt noen bestemt opplæring for å være effektiv. Mange hunder vil vise reduserte eller ingen angstsymptomer etter første gangs bruk. Andre hunder krever tre eller fire ganger før de begynner å vise bedring.

## Tilpassing og tilvenning

Før første gangs bruk av Thundershirt, anbefaler vi følgende fremgangsmåte imens hunden din IKKE føler seg engstelig:

1. Før du tar Thundershirt på hunden din for første gang, gi den en liten godbit ved hjelp av den sammenbrettede Thundershirt som et "fat". Hunder blir vanligvis mer komfortable og tillitsfulle med noe de forbinder med mat.
2. Deretter følger du "Monteringsanvisning" på den andre siden av dette arket. La Thundershirt være på i 5-10 minutter.

Etter disse enkle instruksjonene lærer du hvordan du skal bruke Thundershirt mens hunden er rolig og bidrar til å unngå risikoen for at hunden skal assosiere Thundershirt med det som plager den. Det kan også være fordelaktig å sette på Thundershirt hver 4.-8. uke, selv i fravær av angst.

## Etter tilpasning og tilvenning

1. Når en angst situasjon er sannsynlig eller allerede er til stede (f.eks. tordenvær) tar du Thundershirt på hunden din. Observer resultatene. For mange angstsituasjoner behøver ikke hunden ytterligere behandling. Hvis du ikke er fornøyd, gå til neste trinn.
2. (I de fleste tilfeller ikke nødvendig): Hvis hunden din har behov for mer behandling, anbefaler vi å integrere Thundershirt i et treningsprogram.

Varenr.	Str.	Brystmål	Vekt
278100	XXS	23 - 33 cm	< 4 kg
278101	XS	33 - 43 cm	4-6 kg
278102	S	43 - 53 cm	7-11 kg
278103	M	53 - 64 cm	12-18 kg
278104	L	64 - 76 cm	19-29 kg
278105	XL	76 - 94 cm	30-50 kg
278106	XXL	94 - 127 cm	> 50 kg



**SIKKER, EFFEKTIV, TRENGER  
IKKE MEDIKAMENTER OG  
ENKEL Å BRUKE**



SE VIDEO

