



KRUUSE Thorax trokar og drænsonde

Er du på forkant, når du skal behandle hunde med sygdomssymptomer i det inter-pleurale hulrum?

Uanset om det drejer sig om ophobning af pleuravæske, eller om det er et tilfælde af en kollapsede lunge (pneumothorax), så giver KRUUSE drænsonden med trokar hurtig adgang til brystkassen.

- Trokaret er skarpt som en kniv for nem og hurtig indføring
- Drænsonden er udstyret med to atraumatiske sidehuller for at lette dræningsprocessen
- Røntgenabsorberende markering på drænsonden sikrer røntgendetektion

Dræning af brysthulen

Med det sterile sæt er det muligt at dræne brysthulen øjeblikkeligt, og det er let og sikkert at anvende.

Hvert sæt består af:


- Trokar og drænsonde specielt designet til brysthulen
- Specielt designet adapter med luer lock tilkobling til enden af kanylen. (Disse 2 dele kan først kobles sammen, når adapteren er klippet af)
- 3-vejs stophane med luer lock tilkobling
- 30 ml luer lock sprøjte
- Klemme, sakseformet
- Nylonsutur

Fremgangsmåde:

- Lad drænsonden sidde i den ønskede position og træk 2/3 af trokaret ud
- Luk af med klemmen
- Klip drænsonden til i den ønskede længde og sæt adapteren på
- Tilslut 3-vejs stophanen (luer lock)
- Sæt sprøjten på og dræningsprocessen påbegyndes

Dræning af brysthulen – nødhjælpsprocedure

1. Placér hunden i liggende stilling på siden og klargør brystarealet fra nederste ribben til forben.
2. Punktér huden på det højeste punkt på brystkassen i mellemrummet mellem 9. og 10. ribben.
3. Indfør trokar og drænsone ind subkutant i retning mod kraniet, så det i afstand svarer til 2-3 ribben.
4. Drej trokar og drænsone så de peger mod brystvæggen i en vinkel på 90°, mens der holdes fast på drænsone ca. 2-4 cm fra den nederste spids af trokaret for at undgå, at man kommer for langt ind i brysthulen.
5. Med den frie hånd trykkes trokaret og drænsone forsigtigt gennem mellemrummet ved ribbenene og ind i brysthulen.
6. Når trokarspidsen er nået ind i brysthulen, ændres vinklen på trokaret til at pege kranio-ventralt. Drænsone fjernes fra trokaret ved at skubbe det længere ind i brysthulen, stadig kranio-ventralt.

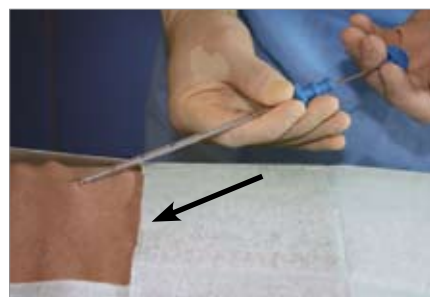

7. Før trokaret fjernes helt, lukkes sonden med vedlagte klemme.



8. Et tobakspoesutur og et "Chinese finger trap" sutur vil sørge for at holde sonden på plads.



9. Skær sonden af i den ønskede længde og sæt adapteren på.



10. Tilslut 3-vejs stophanen til adapteren. Sprøjten sættes på 3-vejs stophanen.



11. Dræningsposition.



12. Tømningsposition.



KRUUSE Thorax trokar og drænsonde

Drænsonden, som er steriliseret med ethylenoxid, er udstyret med:

- Trokar for nem gennemtrængning, placering og håndtering
- Markeringer helt fra spidsen for nem bedømmelse af dybde
- To atraumatiske sidehuller for at lette dræningsprocessen
- Proksimal ende med konisk forbindelsesstykke for nem tilslutning til dræningsflaske
- Røntgenabsorberende streg for røntgendetektion

Varenr.	Str. trokar
---------	-------------

230643	10 FG
--------	-------

230642	12 FG
--------	-------

230644	16 FG
--------	-------

230645	20 FG
--------	-------



Sæt til dræning af brystkassen

Hvert sæt består af:

- Trokar og drænsonde (specielt designet til brysthulen)
- Specielt udviklet adapter med luer lock tilkobling til enden af kanylen.
(Disse 2 dele kan først kobles sammen, når adapteren er klippet af)
- 3-vejs stophane med luer lock tilkobling
- 30 ml luer lock sprøjte
- Sakseformet klemme
- Nylonsutur

Varenr.	Str. trokar
---------	-------------

230660	10 FG
--------	-------

230661	12 FG
--------	-------

230662	16 FG
--------	-------

230663	20 FG
--------	-------

